

Adcon® Gel

Gel anti-adesão para cirurgia da coluna



Produto importado

Países baixos. Holanda



**REGISTRO ANVISA N°81407590003.
NCM 30067000.**



O QUE SÃO ADERÊNCIAS?

O tecido cicatricial e a fibrose são uma parte normal e até necessária do processo de cicatrização de uma ferida.

As aderências são bandas de tecido fibroso que unem superfícies que não estão em contato normalmente e impedem a livre circulação de estruturas anatômicas entre as camadas de tecidos.

As aderências são uma complicação grave e frequente, normalmente ocorrem no local do procedimento cirúrgico, se desenvolvem durante os primeiros 3 ou 5 dias após a cirurgia e pode requerer de novo a hospitalização e intervenção cirúrgica.

Em cirurgia espinal aderências pode causar dor recorrente nas costas ou pernas e gerar ao paciente limitações físicas que tornam necessária uma nova intervenção.



Tecido preparado com intervenção de fibroblasto



Fibroscitos em estágio avançado de adesão

O que é ADCON®Gel




É um gel fluido, biocompatível e reabsorvível, composto por sulfato de povidextrano combinado com gelatina de origem porcino em solução salina tamponada de fosfato que fornece uma barreira para evitar a adesão entre os tecidos, inibe a migração de fibroblastos e previne a fibrose peridural pós-cirúrgica, durante procedimentos de laminectomia, laminotomia, disectomia e fusão espinal. Como resultado o Adcon Gel causa uma melhor e segura reabilitação do paciente, redução da dor recorrente e diminuição do número de reoperações como resultado de tais aderências.



Adcon® Gel envolve a raiz nervosa, dura-máter e os ligamentos minimizando a adesão.



Área vertebral intra-operatória mostrando raízes nervosas livres de adesão, dura-máter e ligamento.

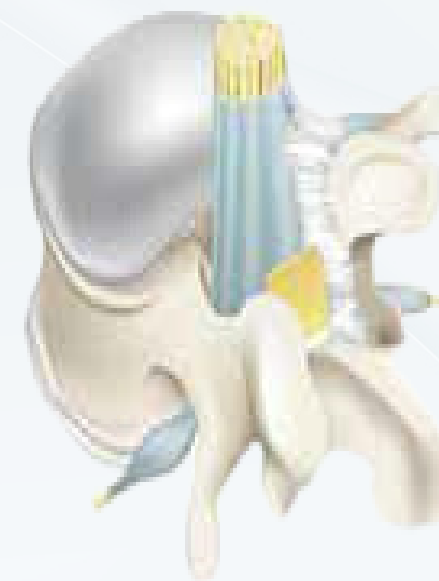

Área vertebral pós-operatória não tratada mostrando aderências em torno da área operada de dura, raiz nervosa, ligamento e tecidos moles.

INDICAÇÕES PARA ADCON®GEL.

ADCON®Gel é usado como uma barreira reabsorvível para inibir a formação de fibrose peritendínea, perineural e peridural pós-operatória, bem como aderências entre tecidos. É indicado para coluna vertebral em procedimentos posteriores de laminectomia lombar ou laminotomia em que raízes nervosas ou dura-máter são expostas, em estenose espinhal e discectomia.

ADCON®Gel



BENEFÍCIOS DO ADCON® GEL

- **Previne a formação de aderências:** Previne fisicamente a formação de aderências entre os tecidos, adere aos tecidos nos quais é aplicado e inibe o deslocamento dos fibroblastos.
- **Absorvível:** O gel é absorvido gradualmente ao longo de um período de 4-6 semanas.
- **Biocompatível:** Os componentes do Adcon Gel são constituintes biológicos do corpo humano.
- **Hemostático:** Com efeito hemostático.
- **Histórico clínico extenso-**usado em mais de 300.000 casos em todo o mundo e em mais de 10 estudos clínicos desde sua introdução em 1996.
- **Facilidade de uso:** Pronto para usar, fácil de manusear, com aplicador especial para distribuir o gel com facilidade e segurança em estruturas irregulares ou de difícil acesso.
- **Esteril:** Fornecido estéril em kit com seringa e aplicador.





**Produto distribuído por
LEALMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS**

Contacto

Endereço:

Av. Copacabana, 268 -Empresarial 18 do Forte, Barueri -SP, 06472-001

Sala 502-503-1302

Telf. +55(11) 4210-2686.

Cel. / Whatsapp: +55(11) 94833-1795

Cel. / Whatsapp+55(11) 98994-4059

www.lealmedical.com

Instagram: @lealmedical